

製品について

介護施設や病院など送迎の際、利用者の方が毎日行う車両の乗降時に使用する目的で開発された乗降補助器具です。

各部の名称



製品の使用について

- 警告**
- この製品の目的以外の使用はおやめください。事故の原因となります。
 - 平らな場所・支柱の設置場所がすべて当たり、すべりにくい地面や床・踏み台が埋もれない場所を選んで使用してください。
 - 必ず介助者が付き添いでご使用ください。
 - 周囲に危険な物がない場所で使用ください。
 - 必ず運動靴など滑りにくい履物を履いてください。
 - 改造しての使用はおやめください。

お手入れについて

★金属部分(フレーム)

凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびりついた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。ご使用後は必ず乾燥させてください。

- 注意**
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾール・ベンジンなどの揮発性の物は使用しないでください。変質・変色・傷みの原因となります。
 - たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。傷みの原因となります。
 - 熱湯やオゾンで洗浄しないでください。故障・変質・変色の原因となります。

保管について

安全な場所について保管してください。

- 注意**
- 下記のようなところに歩行器や部品を放置しないでください。
 - ・車道に近いところ
 - ・人通りのあるところ
 - ・路面に段差や凹凸のあるところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・雨風の当たるところ
 - ・海沿いの屋外(潮風のアたるところ)
 - ・直射日光の当たる場所(車内も含む)
 - ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
 - ・ほこりが多い場所
 - ・子供がいたずらをする恐れのある場所
 - ・非常口、消火器、消火栓の前
 - ・坂道
 - ・暑い日や寒い日の戸外(事故や腐食・破損の原因になります)

安全に関するご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

[表示マークの説明]

※正しい取り扱いに関する必要項目をシンボルマークで表示しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合、障害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
 禁止	してはいけないことを示しています。

※以下の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります。

 警告	危険です 取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
●この製品は、溝、段差、傾斜などがある場所では使用しないでください。 ●踏み台を火気に近づけないでください。 ※シート部が燃えたり、熱くなった金属部分でやけどするなど危険です。 ●勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が劣化して危険です。 ●使用者の安全確保のため、必ず介助者が付き添ってください。	

 注意	ご注意いただきたいこと 取り扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される場合および物質的損害のみの発生が想定されるもの。
●使用する前に各部の点検をしてください。 ●踏み台を投げ落としたり、衝撃を加えないでください。 ●長期屋外に放置すると汚れ、腐食などにより製品が劣化します。保管は屋内で行ってください。 ●天板の上で爪先立ちはしないでください。転倒の原因となります。	

- 禁止** 荷重について：使用荷重は最大 150kg。体重及び体重と装備の合計重量が 150kg を越える時は使用をおやめください。

- 禁止** その他ご利用に関して：身体に異常を感じるといった時は使用をおやめください。◎疲れているとき ◎病気・ケガのとき ◎お酒を飲んだときなど